

Gebrauchsanweisung Rollator



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Der Rollator wird im Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient. Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

Beschreibung des Rollators



Indikation

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren

Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator wird vormontiert geliefert. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen. Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit Festziehen des Hebels. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.




Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen in die am Rahmen vorhandenen Haken. Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten. Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kippisiko erhöht.



Tablett montieren

Der Rollator muss entfaltelt sein. Legen Sie das Tablett von oben auf das Sitzpolster. Die vier Zapfen auf der Unterseite des Tablett passen zu den Aussparungen auf dem Sitzpolster. Drücken Sie das Tablett fest in die Aussparungen.

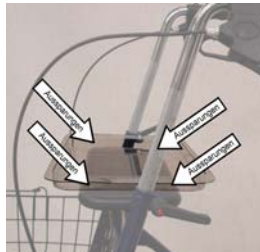

Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremse kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremse härter) oder hinein (Bremse weicher).



Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren.

Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen Sie dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.



Feststellbremsen

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten. Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt. Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus.



Aufstellung

Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie wie im Abschnitt **Fehler!**

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

beschrieben die Bremsen. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator.

Drücken Sie die Sitzfläche nach unten und schließen Sie den roten Sicherungshebel.



Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen lassen.

Lösen Sie zunächst die rote Sicherung am Rahmen, um den Faltevorgang zu ermöglichen.

Betätigen Sie die Bremse wie im Abschnitt **Fehler!** **Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

beschrieben.

Ziehen Sie den Rollator an den Handgriffen zu sich heran. Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen lassen.



Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

- Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)

Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Technische Daten

Wiedereinsatz

- Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Rollator

Bereifung	PU-Bereifung
Material	Stahlrahmen (lackiert) Sitzfläche PU Tablett PE
Farbe	silber-0 / blau-1
Sitzhöhe (cm)	61
Schiebegriffhöhe (cm)	78 – 98
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamtlänge (cm)	70
Gesamthöhe (cm)	98
Gewicht (kg)	10,5
Zuladung Einkaufskorb (kg)	3
Max- Belastbarkeit (kg)	120

Wartung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren. Prüfen Sie, ob die Schrauben zur Fixierung des Sitzes am Auflagerohr fest angezogen sind. Falls nicht, ziehen Sie die Schrauben bitte fest. Prüfen Sie, ob alle Steck- und Schnellverschlüsse richtig eingestellt und vollständig eingerastet sind. Prüfen Sie, ob alle Knöpfe der Steck- und Schnellverschlüsse sich einwandfrei lösen und wieder fixieren lassen. Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleissteile wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

Trendmobil GmbH

Frohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9359-0

Telefax: +49 (0) 5254-9359-29

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: